



PRISMATIC

ZĄB MŁODY • DOROSŁY • DOJRZAŁY

Natural DSL
HT
LF
ZiR



PRISMATIC DENTIN

by Nunzio Rosa

Natural PRISMATIC DENTIN

Specjalne materiały do zaawansowanego warstwowania

Masy dentynowe PRISMATIC DENTIN były badane przy współpracy z technikiem dentystycznym Nunzio Rosa i są idealne do wykonania naturalnych uzupełnień - bardzo estetycznych i doskonale zintegrowanych w jamie ustnej.

Masy PRISMATIC DENTIN, począwszy od młodego wieku, przez dorosły do dojrzałego - pozwalają naśladować efekt starzenia zębów w części dentynowej.

Warstwowanie - masy PRISMATIC DENTIN są podzielone w grupach wiekowych zębów:

MŁODY dla młodych zębów, DOROSŁY dla zębów u pacjentów dorosłych, SENIOR dla starszych zębów.


Wszechstronne i wielofunkcyjne masy dentyn pryzmatycznych można użyć do wykonania kompletnej części dentyny oraz do charakteryzacji i stosowania w klasycznej technice warstwowania.

Materiały PRISMATIC DENTIN są: dostępne dla wszystkich linii Natural Ceramic: HT, LF i ZiR.

Natural PRISMATIC DENTIN

Specjalne materiały do zaawansowanego warstwowania

Na schematach kilka przykładów zaawansowanej stratyfikacji z wykorzystaniem mas i technik stratyfikacji Natural Prismatic Dentin

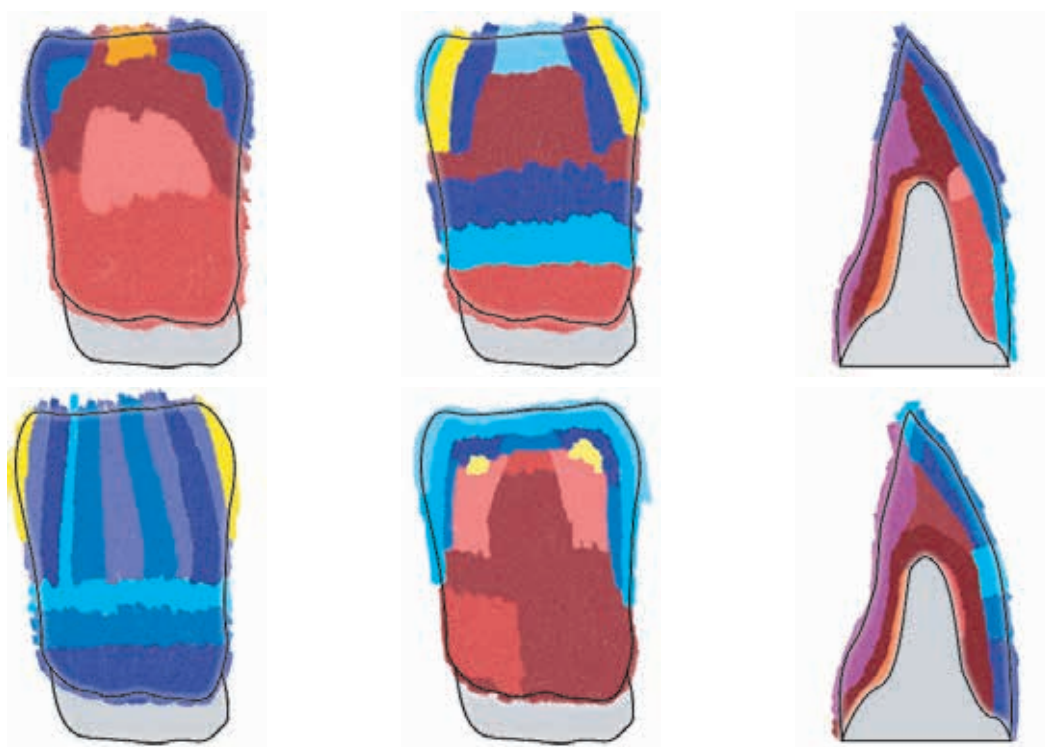

- www.naturalceramic.it - www.holtrade.pl - www.naturalceramic.it - www.holtrade.pl -

Natural PRISMATIC DENTIN

MASTER FLUO

Wysoce fluorescencyjna masa opakerowa

Specjalna masa Prismatic Dentin MASTER FLUO została zaprojektowana we współpracy z technikiem dentystycznym Nunzio Rosa - jest optymalna do realizacji naturalnych uzupełnień estetycznych doskonale zintegrowanych w jamie ustnej.

Masa MASTER FLUO pozwala budować bazę fluorescencyjną w głębokim „rdzeniu” dentyny, tworzący kolor bardzo „gorący” i intensywny, typowy dla naturalnych zębów.



HT - LF



na schematach kilka przykładów zaawansowanej stratyfikacji z wykorzystaniem mas i technik stratyfikacji Natural Prismatic Dentin

- www.naturalceramic.it - www.holtrade.pl - www.naturalceramic.it - www.holtrade.pl -


Natural PRISMATIC DENTIN

Prismatic Dentin YOUTH

Masa dentynowa dla młodych zębów

Materiał Prismatic Dentin YOUTH jest optymalny do budowania młodych zębów, charakteryzuje się niskim nasyceniem koloru i wysoką jasnością.

Odzwierciedla „podstawowe” aspekty - młody, jasny ząb, z chromatycznością, która nie jest decydująca, ale z bardzo wysoką „witalnością” koloru.

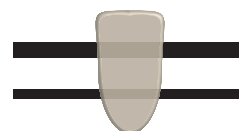

HT - LF - ZiR




Prismatic Dentin ADULT


Masa dentynowa dla dorosłych zębów

Materiał Prismatic Dentin ADULT jest optymalny do budowania dorosłych zębów. Charakteryzuje się żywym i oznaczonym kolorem z dobrą jasnością.

Odtwarza aspekty wewnętrzne zęba dorosłego, który nie jest już młody, ale jeszcze nie stary - z mocno zdefiniowaną chromatycznością - na których można odtwarzać efekty indywidualne na przykład charakteryzacje z powodu palenia tytoniu, odbarwienia lub inne cechy.

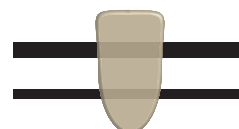

HT - LF - ZiR

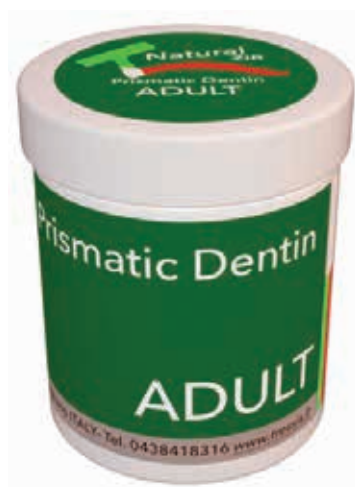


Prismatic Dentin SENIOR

Masa dentynowa dla zębów starszych

Prismatic Dentin SENIOR jest optymalna o tworzenia starszych zębów – niska jasność, bardzo duża głębia dentyny, niska przezierność. Prismatic Dentin SENIOR to połączenie wysokiej chromatyczności i niskiej jasności.

Odtwarza typowy efekt zęba osoby starszej, charakteryzujący się niską opakowością i dużą głębią koloru.

Chromatyczność masy SENIOR jest dość wyraźna, ale może być dodatkowo kondycjonowana masą Modifi Dentin i masą Cromatizer, które pozwalają na dokładniejszą identyfikację dominującego koloru.

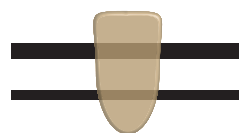

HT - LF - ZiR



Na zdjęciach przykłady zaawansowanego nakładania z wykorzystaniem mas i techniki nakładania warstw Natural Prismatic Dentin:

fot. 1A-1B: Prismatic Dentin YOUTH po pierwszym wypalaniu (1A) i po odbudowie (1B)

fot. 2A-2B: Prismatic Dentin ADULT po pierwszym wypalaniu (2A) i po uzupełnieniu (2B)

fot. 3A-3B: Prismatic Dentin SENIOR po pierwszym wypalaniu (3A) i po uzupełnieniu (3B)


- www.naturalceramic.it - www.holtrade.pl - www.naturalceramic.it - www.holtrade.pl -

Natural PRISMATIC DENTIN

SPECIAL ENAMEL MASTER

Specjalny brzeg sieczny

Masa SPECIAL ENAMEL MASTER jasna, z efektem perłowym i mlecznym; używana ekstensywnie jest idealna do tworzenia typowego efektu siecznego młodego i jasnego zęba; używana w mniejszości do innych, bardziej szarych mas szkliwa, pozwala na realizację efektów trójwymiarowych w obszarze siecznym.

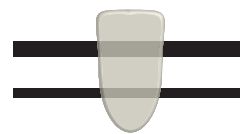

HT - LF - ZiR

Special Enamel MASTER pozwala tworzyć efekty bardzo estetyczne i/ lub szczególne.

Używana tylko na brzegu siecznym, tworzy aureolę o kremowym odcieniu o dużej wartości związanej z wysoką opalescencją

Special Enamel MASTER w odpowiednim połączeniu z innym szkliwem o niższej wartości (Smalto Speciale Meteorite, Smalto Speciale LuNe) lub o wyższej wartości (Smalto S58, Smalto SC57, Smalto Speciale FB1) tworzy niestandardowe efekty z grą opalescencji i wysoce estetycznej jasności.



- www.naturalceramic.it - www.holtrade.pl - www.naturalceramic.it - www.holtrade.pl -

Natural PRISMATIC DENTIN

Natural[®]

CERAMIC
SYSTEM

Natural Ceramic System to najbardziej kompletna gama ceramiki Dentystycznej przygotowanej dla sukcesu Twojego laboratorium:

Natural Ceramic System is the most complete range of dental ceramics for the success of your laboratory:

DSL pastylki dwukrzemianu litu do prasowania

DSL pressable lithium silicate ingots

HT Ceramika do stopów tradycyjnych, odpowiednia do nakładania warstw na konstrukcji ze stopu i na ceramikę tłoczoną

HT ceramic for traditional alloys, suitable for layering on alloy frame and pressing full ceramic restorations Ceramika

LF do stopów szlachetnych, odpowiednia do nakładania warstw na konstrukcji ze stopów i na ceramikę tłoczoną

LF ceramic for universal alloys, suitable for layering and pressing both on alloy frame and full ceramic restorations

ZiR Specjalna ceramika do cyrkonu i dwukrzemianu litu do warstwowania zarówno na cyrkonie oraz ceramice pełnokonturowej **ZiR** special ceramic for zirconia and lithium silicate for layering and pressing both on zirconia frame and full ceramic restorations

STAINS farby uniwersalne w proszku i paście, jasne i błyszczące, mocno fluorescencyjne

STAINS universal, bright and glossy, highly fluorescent powder and paste stains

GLAZE FX pełna gama materiałów do glazurowania: proszek, pasta, pasta fluorescencyjna i spray fluorescencyjny

GLAZE FX a full array of glazing materials: powder, paste, fluorescent paste and fluorescent spray

MASTER SET Masy koloryzujące dla kolorów spoza skali A-D

MASTER SET advanced shades for off-scale colors A-D

MONOWARSTWA The One to oryginalna ceramika - monomasa do stopów i cyrkonu

MONO-LAYER The One is the original mono-layer ceramic for alloys and zirconia

MICRO-LAYER proszki i specjalne pasty do mikronakładania (gruntowania) na dwukrzemian litu i cyrkon pełnokonturowy

MICRO-LAYER special powders and paste for micro-layering on lithium silicate and full contour zirconia

CRYSTAL kompletny zestaw specjalnych past ceramicznych do mikrowarstwowego „malowania” tlenku cyrkonu, dwukrzemianu litu i ceramiki na tradycyjnych stopach.

CRYSTAL special ceramic pastes for micro-layering on zirconia, lithium silicate and traditional alloys-ceramic

Natural Ceramic System: ceramika dentystyczna w stylu włoskim

- www.naturalceramic.it - www.holtrade.pl - www.naturalceramic.it - www.holtrade.pl -

Natural PRISMATIC DENTIN

Nunzio ROSA

TECHNIK DENTYSTYCZNY

Nunzio Rosa, urodzony w Castelnovo Bocca d'Adda (LO), ukończył kierunek technik dentystyczny w instytut „Enrico Fermi” w Este (PD).



Zdobył wieloletnie doświadczenie w dziedzinie ceramiki na metalu, a następnie rozwiązaniach cyrkonowych oraz badaniach nad zwiększeniem wydajności i estetykizacji prac protetycznych. Uczestniczył przez lata w różnych profesjonalnych kursach doszkalających prowadzonych przez techników światowej sławy, w tym Michela Magne, Marca André Leriche, Willi Gellera.

Właściciel laboratorium dentystycznego od 1984 w Casale di Scodosia (PD), stworzył profesjonalne zdigitalizowane laboratorium protetyczne wyspecjalizowane w budowie konstrukcji i ceramiki na cyrkonie.

Współpracuje z Tressis Italia w realizacji kursów na podstawowym i zaawansowanym poziomie zawodowym. Należy do grupy R&D (Badania i Rozwój) firmy Tressis Italia, w której prowadzi badania w zakresie rozwoju innowacyjnych mas.

 **TRESSIS ITALIA srl**

viale Italia, 194
31015 Conegliano (TV) ITALIA

Tel (+39) 0438 41 83 16

Fax (+39) 0438 42 64 50

web www.tressis.it - email info@tressis.it



 0546

DISTRIBUTED BY:



HOLTRADE

technologie dentystyczne

HOLTRADE 05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 51

tel. /fax +48 22 750 40 70, tel. kom.

www.holtrade.pl • holtrade@holtrade.pl

Natural DSL
HT
LF
ZiR



PRISMATIC DENTIN

by Nunzio Rosa



PRISMATIC

ZĄB MŁODY • DOROSŁY • DOJRZAŁY