



NUOVA A.S.A.V. snc

**PODRĘCZNIK OBSŁUGI I KONSERWACJI
MIESZADŁO PRÓŻNIOWE
MIXER MX4N-MXR**

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

Przeczytaj i przechowaj te instrukcje

Uwaga: Użycie narzędzi elektrycznych i kontakt z energią elektryczną, stwarza ryzyko porażenia prądem elektrycznym i/lub pożaru, należy przestrzegać poniższych zasad bezpieczeństwa. Zapoznaj się i przestrzegaj tych wskazówek przed uruchomieniem urządzenia oraz przechowuj niniejszą instrukcję.

1. Utrzymuj porządek miejsca pracy: zanieczyszczenia w miejscu pracy mogą spowodować wypadki.
2. Warunki środowiskowe: Nie wystawiaj elektronarzędzi na deszcz. Nie należy używać narzędzi elektrycznych w środowiskach mokrych lub wilgotnych. Należy zapewnić dobre oświetlenie. Nie należy używać narzędzi elektrycznych w pobliżu łatwopalnych cieczy lub gazu.
3. Unikać kontaktu z uziemionymi obiektami, jak np. rury, grzejniki, metalowe obudowy urządzeń.
4. Trzymaj z dala od dzieci: Nie pozwól osobom trzecim dotykać urządzenia lub kabla.
5. Umieść swoje urządzenie w bezpiecznym miejscu: Umieść urządzenie w suchym i bezpiecznym miejscu niedostępnym dla dzieci.
6. Nie przeciążaj urządzenia: Będziesz pracować lepiej i bezpieczniej używając mocy podanej na tabliczce znamionowej.
7. Wybór narzędzia: Nie stosować elektronarzędzi o niskiej mocy i akcesoriów o dużej mocy. Nie należy używać narzędzi do pracy i celów, dla których nie zostały zaprojektowane.
8. Ubrania robocze: Podczas pracy, zawsze ubieraj się odpowiednio, unikaj stosowania luźnych lub zbyt dużych ubrań.
9. Okulary ochronne: Zawsze należy używać okularów ochronnych. Jeżeli podczas pracy powstaje pył, użyj maski.
10. Należy zwrócić uwagę na kabel: Nie podnoś urządzenia za kabel i nie wyciągaj wtyczki z gniazda ciągnąc za kabel zasilający. Chroń kabel przed wysoką temperaturą, olejem i ostrymi krawędziami.
11. Zamocuj części przeznaczone do pracy: Upewnij się, że części są przymocowane i stałe. Podczas pracy, zawsze obsługuj urządzenie obiema rękami.
12. Należy unikać niebezpiecznych miejsc: Pamiętaj, aby ustawić urządzenie w bezpiecznym, stabilnym miejscu, w celu utrzymania właściwej równowagi.
13. Zadbaj o swoje narzędzia: Aby pracować w sposób bezpieczny, czyść narzędzia, wykonując następujące zalecenia dotyczące konserwacji i wymiany zużytych narzędzi. Często kontroluj przewody i, w przypadku uszkodzeń oddaj do naprawy wykwalifikowanej osobie. Regularnie sprawdzaj przedłużacze i zmieniaj je, jeśli są uszkodzone, muszą być suche i czyste.
14. Zmiana narzędzi roboczych: Przed naprawą lub wymianą narzędzia (na przykład ostrze piły lub zużyte narzędzia), zawsze należy odłączać urządzenie od źródła zasilania.
15. Nie zostawiaj kluczy naprawczych na urządzeniu: Przed użyciem narzędzia należy sprawdzić czy klucze używane do naprawy zostały zabrane.
16. Unikać przypadkowego uruchomienia: Przed włożeniem wtyczki do gniazdka zasilania należy zawsze upewnić się, że przełącznik jest wyłączony.
17. Nie używać urządzenia w otwartych miejscach: Urządzenie musi być używane wewnątrz pomieszczeń oraz w dobrze oświetlonym miejscu.
18. Zawsze zwracać uwagę podczas pracy: Podczas pracy nie należy się rozpraszać. Brak uwagi może spowodować wypadek. W obecności innych ludzi w miejscu pracy, zaleca się utrzymanie odpowiedniej odległości od operatora i urządzenia, w celu uniknięcia niepożądanego kontaktu z częściami maszyn w ruchu lub opiłkami powstającymi podczas cięcia.
19. Zawsze należy sprawdzić uważnie czy urządzenie nie jest uszkodzone: Przed użyciem urządzenia należy sprawdzić wydajność i działanie urządzeń bezpieczeństwa oraz w razie potrzeby wymienić uszkodzone części. Sprawdź wydajność ruchomych części, czy nie posiadają części zaciśniętych lub uszkodzonych oraz czy wszystkie inne części są poprawnie złożone i spełniają wszystkie optymalne warunki, które mogą mieć wpływ na prawidłowe działanie jednostki. Urządzenia bezpieczeństwa lub uszkodzone części muszą być naprawione lub wymienione przez Pomoc Techniczną.
20. Uwaga: Dla własnego bezpieczeństwa używaj tylko narzędzi i akcesoriów wskazanych do użytku lub oferowanych w odpowiednich katalogach. Zastosowanie innych akcesoriów i narzędzi nie wskazanych do użytku lub w katalogu, może spowodować wypadek.
21. Wykwalifikowany personel do wymiany narzędzia: zgodnie z obowiązującymi wytycznymi dotyczącymi bezpieczeństwa wymiana może być wykonywana tylko przez autoryzowany serwis.
22. Pole elektromagnetyczne: Urządzenie jest wyposażone w elektromagnetyczne elementy, które emitują znaczne pole elektromagnetyczne na różnych etapach pracy. Z tego powodu osoby użytkujące wyroby medyczne (takie jak stymulatory serca) powinny zachować odpowiednią odległość od urządzenia.

ZACHOWAJ TE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

NUOVA A.S.A.V. S.N.C. DZIĘKUJEMY ZA ZAKUP NASZEGO PRODUKTU I PROSIMY O UWAŻNE PRZECZYTANIE TEGO PODRĘCZNIKA. ZNAJDZIESZ W NIM WSZYSTKIE NIEZBĘDNE INFORMACJE DO PRAWIDŁOWEGO KORZYSTANIA Z ZAKUPIONEGO URZĄDZENIA, UŻYTKOWNIK JEST ZATEM ZOBOWIĄZANY DO PRZECZYTANIA I PRZESTRZEGANIA TYCH INSTRUKCJI. PONADTO, NINIEJSZA INSTRUKCJA POWINNA BYĆ TRZYMANA W ODPOWIEDNIM MIEJSCU - ŁATWO DOSTĘPNYM W RAZIE POTRZEBY.

ZAWARTOŚĆ TEGO PODRĘCZNIKA MOŻE ZOSTAĆ ZMODYFIKOWANA BEZ WYPOWIEDZENIA LUB ZOBOWIĄZAŃ, W CELU WŁĄCZENIA ZMIAN I USPRÁWNIÉŃ JUŻ DOSTARCZONYCH JEDNOSTEK.

ZABRANIA SIĘ KOPIOWANIA LUB TŁUMACZENIA DOWOLNYCH CZĘŚCI TEGO PODRĘCZNIKA BEZ PISEMNEJ ZGODY WŁAŚCICIELA.




NIE UŻYWAĆ URZĄDZENIA DO INNYCH CEŁÓW NIŻ PLANOWANE.
W PRZYPADKU ROZBIÓRKI, POSTĘPUJ ZGODNIE Z PRZEPISAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W KRAJU, W KTÓRYM OPERACJA TA JEST PRZEPROWADZANA.

SPIS TREŚCI

- 1.0 DANE TECHNICZNE
- 2.0 KONTROLA URZĄDZENIA
- 3.0 OGÓLNE INFORMACJE O URZĄDZENIU
- 4.0 URUCHOMIENIE URZĄDZENIA
- 4.1 INSTALACJA
- 4.2 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE
- 5.0 TRANSPORT
- 6.0 KORZYSTANIE Z URZĄDZENIA
- 7.0 OKRESOWA KONSERWACJA PRZEZ OPERATORA
- 7.1 PRZEWÓD ZASILANIA
- 7.2 SMAROWANIE
- 7.3 WYMIANA FILTRA
- 7.4 CZYSZCZENIE
- 8.0 PROBLEMY - ROZWIĄZANIA
- 9.0 AKCESORIA
- 10.0 ZAŁĄCZNIKI
- 10.1 CZĘŚCI
- 10.2 SCHEMAT POŁĄCZEŃ
- 10.3 ZNAKI I CERTYFIKATY
- 10.4 DEKLARACJA ZGODNOŚCI
- 11.0 OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA

1.0 DANE TECHNICZNE

OPIS	JEDNOSTKA MIARY	NAPIĘCIE 220V	NAPIĘCIE 110V
POMPA PRÓŻNIOWA		BEZOLEJOWA	BEZOLEJOWA
POBÓR MOCY	WATT.	140	280
NATEŻENIE PRĄDU	AMPERE	0.75	1.5
LICZBA OBROTÓW	RPM	400	400
STOPIEŃ PRÓŻNI	BAR	0.85	0.85
WYMIARY OPAKOWANIA	mm	Cm 220X160x300h uchwyt ścienny 220x160x615 H podstawa stołowa	Cm 220X160x300h uchwyt ścienny 220x160x615 H podstawa stołowa
WAGA	KG	8,5 z uchwytem ściennym 10 z podstawą stołową	8,5 z uchwytem ściennym 10 z podstawą stołową

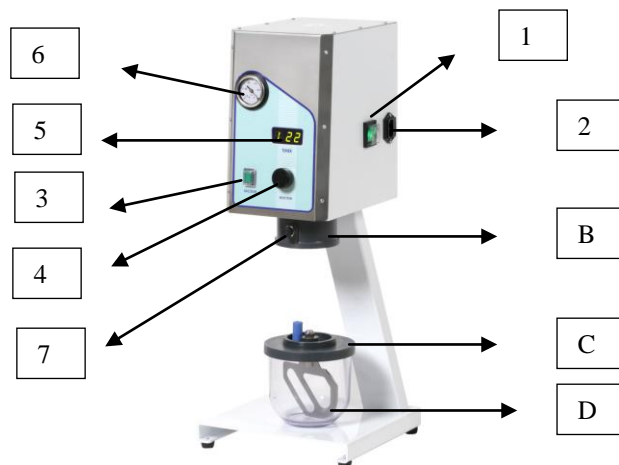

2.0 KONTROLA URZĄDZENIA

1. **PRZELĄCZNIK STARTU:** włącza urządzenie, zapala się wewnętrzna lampka kontrolna
2. **GNIAZDO BEZPIECZNIKA:** zawiera bezpiecznik chroniący obwód elektryczny



3. **PRZYCISK URUCHOMIENIA POMPY PRÓŻNIOWEJ:** wciśnij przycisk aby uruchomić lub wyłączyć pompę próżniową
4. **UNIERSALNY PRZYCISK URUCHOMIENIA SILNIKA:** Po przekręceniu tego potencjometru zegar wydłuża czas pracy lub skraca jeśli zostanie obrócony w lewą stronę. Jeśli zostanie naciśnięty raz, łopatką zacznie się obracać, naciśnięty ponownie zatrzyma łopatkę. W modelu MXR przycisk ten służy również do wejścia / wyjścia z menu oraz wyboru automatycznego cyklu pracy.
5. **WYŚWIETLACZ:** pokazuje czas pracy i cykl.
4. **PRZYCISK WYBORU MINUT:** pozwala na wybór czasu mieszania
4. **POTENCJOMETER:** pozwala regulować czas mieszania.
6. **WSKAŹNIK PRÓŻNI:** pokazuje wartość próżni wytworzonej w pojemniku.
7. **ZAWÓR:** otwiera dostęp powietrza do pojemnika.

3.0 OGÓLNE INFORMACJE O URZĄDZENIU

Mieszadło składa się z obudowy malowanej proszkowo oraz wymienionych poniżej części podstawowych:

- Pompa próżniowa: jest to bezolejowa pompa tłokowa, która nie wymaga konserwacji
- Silnik: silnik pracujący na 24 V. Nie wymaga konserwacji.
- System elektryczny: Składa się z przełączników i obwodów drukowanych
- Obwód pneumatyczny: łączy pompę próżniową z pojemnikiem miksera.
- Pojemnik mieszadła: ta część ulega zużyciu, zaleca się aby po każdym użyciu dokładnie i ostrożnie oczyścić pojemnik z resztek gipsu lub innej zawartości.

Wewnątrz urządzenia jest wbudowany filtr, który chroni pompę filtrując zasysane powietrze. Musi być wymieniany okresowo co najmniej raz na 2000 cykli pracy lub w przypadku nieprawidłowej pracy (patrz par. 7.3).

4.0 URUCHOMIENIE URZĄDZENIA

4.1 INSTALACJA

Wymij urządzenie z opakowania usuwając jego górne części, otwierając zwróć uwagę, aby nie uderzyć tarczy czołowej.

Po otrzymaniu urządzenia należy sprawdzić, czy wszystkie części są nienaruszone. Jeśli tak nie jest, niezwłocznie skontaktuj się ze sprzedawcą.

Postaw urządzenie na stabilnym podłożu w miejscu dobrze oświetlonym i suchym, z co najmniej 30 cm wolnej przestrzeni po obu stronach.

Przymocuj mikser do ściany używając właściwych wsporników (**PART. E F G H FIG. 1**).

Urządzenie jest już zmontowane i gotowe do pracy.

Nie wyrzucaj opakowania, zachowaj je do ewentualnego transportu.

4.2 PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE

Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie zasilania podane na tabliczce znamionowej zgadza się z napięciem sieci i dołączonym przewodem zasilającym.

Podłącz wtyczkę kabla zasilającego do właściwego wyjścia na urządzeniu. Wykonaj tę operację, kiedy główny przełącznik jest wyłączony.

Podłączenie zasilania musi być przeprowadzane zgodnie z instrukcją NUOVA ASAV, który nie jest odpowiedzialny za połączenia.

Urządzenie dostarczane jest z kablem zasilającym H05 z sekcją odpowiedni dla najwyższego poboru mocy (wskazane w danych technicznych).

Przewód zasilający o długości 2 m.

W przypadku zastosowania przedłużacza upewnij się, że:

- Odcinek kabla pasuje do jego długości. Sekcja ma być prawie taka sama jak przewód łączący.

- Gniazdo przewodu nie jest uszkodzone.

- Miejsce przyłączenia do zasilania sieciowego powinno gwarantować obecność wszystkich niezbędnych zabezpieczeń - zgodnie z obowiązującymi przepisami.

5.0 TRANSPORT

Nie wyrzucaj opakowania, zachowaj je do ewentualnego transportu. W tym przypadku postępuj zgodnie z poniższymi instrukcjami:

A) Wyłącz urządzenie, odłącz kabel elektryczny od urządzenia.

B) Umieść stół montażowy (part D rys. 2) we właściwym opakowaniu z załączonymi kluczami, umieść wszystko w odpowiednim miejscu.

C) Umieść urządzenie i jego akcesoria, oddzielnie, w pakiecie z miękkiego i wstrząsoodpornego materiału.

D) Włóż podręcznik obsługi do pudełka, zakończ pakowanie i zamknij karton.

6.0 WSKAZANIA DO KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA

Operator powinien stać z przodu urządzenia, trzymając pojemnik w prawej ręce (Szczegóły C-D rys. 1) oraz używając lewej ręki do obsługi przycisków kontrolnych umieszczonych na obudowie urządzenia (Szczegóły 3-4-7 rys. 1).

PODCZAS OBSŁUGI POSTĘPUJ ZGODNIE Z KOLEJNYMI CZYNNOŚCIAMI:

1. Włącz urządzenie używając przycisku START (Szczegół 1 rys. 1).

2. Wybierz czas mieszania (lub cykl automatyczny w mieszadle MXR) zgodnie z wybranym materiałem (Part.4 Obrazek 1)

3. Umieść w pojemniku proszek i płyn w odpowiednich proporcjach (wstępnie wymieszaj do uzyskania połączenia – proszek/płyn), a następnie zamknij pojemnik przy pomocy pokrywy z mieszadłem (Szczegół C rys. 1).

4. Włącz pompę próżniową używając przycisku 3 rys. 1.

5. Umieść pokrywę pojemnika w przyłączy (część B rys. 1) położonym w dolnej części. Jeśli nie możesz od razu trafić w odpowiednie miejsce, obróć pojemnik przed włożeniem.

6. Dociśnij pojemnik lekko w górę, aby uszczelka dobrze przylegała.

7. W przypadku gdy stopień próżni (Szczegół 8 rys. 1) przekracza - 0,4 bar na wskaźniku, można pozostawić pojemnik podłączony do próżni.

8. Rozpocznij mieszanie po naciśnięciu przycisku 4 rys. 1. Wprowadzony czas mieszania zostanie zapamiętany i zaproponowany ponownie na wyświetlaczu w ponownym cyklu.

WAŻNE: Zawsze zaczekaj, aż pompa osiągnie maksymalny stopień próżni przed rozpoczęciem mieszania.



1. Kiedy czas mieszania się skończy, łopátka zatrzyma się i brzączyk oznajmi koniec mieszania w próżni.
2. Naciśnij przycisk OFF pompy próżniowej (część 3 rys. 1) zanim chwycisz za pojemnik (części C i D rys. 1), następnie włącz zawór pneumatyczny (Część 9 rys. 1), i zdejmij pojemnik opuszczając go w dół.

UWAGA: Nie należy włączać zaworu pneumatycznego (część 7 z rys. 1) podczas pracy, ponieważ pojemnik mógłby spaść w dół.

WAŻNE: Jeśli zasilanie zostanie odłączone podczas fazy pracy, urządzenie zostanie zatrzymane, a czas mieszania zresetowany. W takim przypadku operator musi natychmiast zabrać pojemnik.

USTAWIENIE CYKLU AUTOMATYCZNEGO (DOSTĘPNE TYLKO W MODELU MXR)

W modelu **MXR** jest możliwe użycie cyklu automatycznego, który jest wpisany w oprogramowanie urządzenia.

Dla różnych typów materiałów jak gips, masa i silikon jest zaprogramowanych 10 różnych cykli pracy, które mogą być ustawione poprzez użycie pokrętki (część 4, rys.1):

Pojedyncze naciśnięcie daje dostęp do menu różnych materiałów naciśnięcie drugi raz daje dostęp do menu czasu mieszania, które mogą być wybrane poprzez obracanie pokrętki w prawo lub lewo. Kolejne naciśnięcie pozwala na potwierdzenie wybranego cyklu pracy i rozpoczęcie mieszania.

Aby wybrać odpowiedni cykl pracy należy dokonać wyboru zgodnie z poniższym schematem:

- 1) Pierwsze naciśnięcie: WEJŚCIE W MENU – WYBÓR MATERIAŁU

U (cykl obsługi) P (gips) C (masa) S (silikon)

- 2) Drugie naciśnięcie: WEJŚCIE W MENU - WYBÓR CYKLU PRACY

Na wyświetlaczu pojawi się NUMERACJA od 0 do -5

Począwszy od 0, przeciętny czas pracy, wzrasta (o 4 sekundy przy każdym numerze). Obracając pokrętkę w prawą stronę zwiększamy numery 1,2,3,4,5, lub obracając w lewą stronę zmniejszamy (o 4 sekundy każdy numer) -1, -2, -3, -4, -5.

W MENU **U** istnieją 3 cykle mieszania z różną prędkością i kierunkami obrotów. Cykl **U** nazywany jest manulnym, ponieważ czas jest ustawiony przez operatora za każdym razem.

- 3) Trzecie naciśnięcie – łopátka zaczyna się obracać.

7.0 OKRESOWA KONSERWACJA PRZEZ OPERATORA

Wszystkie operacje konserwacyjne mogą być wykonane, gdy urządzenie jest wyłączone i odłączone od sieci.

7.1 KABEL ZASILANIA

Należy okresowo sprawdzać stan i kabli i podłączeń. W przypadku uszkodzeń należy je wymienić, czynność ta powinna być wykonywana przez wykwalifikowany personel.

7.2 SMAROWANIE

Okresowe testowanie płynność obrotowej łopátki w odniesieniu do pokrywy pojemnika (Szczegół C rys. 1). Zdarza się, że łopátka ma tendencję do stawiania oporu oraz do infiltracji materiału z zewnątrz, w tym przypadku należy go usunąć. W tym celu należy wykręcić górną nakrętkę, wyczyścić i nasmarować olejem, wszystko z powrotem zmontować i sprawdzić skuteczność działania.

Proponujemy zwilżyć oliwką obie uszczelki, pojemnika i podłączenia.
Wewnętrzna część miksera nie wymaga smarowania.

7.3 WYMIANA FILTRA

Ta operacja musi być wykonywana przez wykwalifikowany personel co 2000 cykli lub w przypadku nieprawidłowego działania urządzenia, np. kiedy urządzenie ma problem z utrzymaniem pojemnika, nawet gdy wskaźnik próżni sygnalizuje prawidłową próżnię.

7.4 CZYSZCZENIE

Utrzymuj urządzenie w czystości. Ważne aby dokładnie oczyścić pojemnik po każdym użyciu, nie należy zostawiać w nim resztek mieszanego materiału.

8.0 PROBLEMY - PRZYCZYNY – ROZWIĄZANIA

Wszelkie czynności mogą być przeprowadzane dopiero po odłączeniu urządzenia od sieci. Nie przeprowadzaj konserwacji, regulacji lub naprawy oraz czynności nie wymienionych w tym PODRĘCZNIKU OBSŁUGI. W razie potrzeby zadzwoń do naszej Pomocy Technicznej.

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
URZĄDZENIE NIE WŁĄCZA SIĘ	ZASILANIE ELEKTRYCZNE NIE DOCIERA DO URZĄDZENIA	SPRAWDŹ PODŁĄCZENIA KABLI POMIĘDZY URZĄDZENIEM A SIECIĄ NA WSZYSTKICH WEJŚCIACH



ŁOPATKA NIE OBRACA SIE SWOBODNIE W OBUDOWIE	USZCZELKI UMIESZCZONE NA TRZPIENIU NIE SĄ NASMAROWANE LUB DOSTAŁ SIĘ MATERIAŁ Z ZEWNĄTRZ POMIĘDZY DWIE POWIERZCHNIE MIĘDZY TRZPIENIEM I OBUDOWĄ.	NALEŻY ZDEMONTOWAĆ ŁOPATKĘ , OCZYŚCIĆ TRZPIEŃ I USZCZELKI ORAZ ZMONTOWAĆ WSZYSTKO PONOWNIE.
MIKSER MA PROBLEM Z UTRZYMANIEM POJEMNIKA (WSKAŹNIK PRÓŻNI NIE WSKAZUJE PRÓŻNI)	USZCZELKI UMIESZCZONE NA POKRYWIE POJEMNIKA I NA PODŁĄCZENIU MIKSERA SĄ BRUDNE I/LUB SUCHE WIĘC NIE USZCZELNIAJĄ	OCZYŚĆ USZCZELKI Z RESZTEK MATERIAŁU I NAWILŻ JE PRZY POMOCY OLIWKI. OCZYŚĆ POWIERZCHNIĘ PRZYLGNI. JEŚLI USZCZELKI SĄ USZKODZONE NALEŻY JE WYMIENIĆ (ZGŁOŚ SIĘ DO OSOBY WYKWALIFIKOWANEJ)
MIKSER NIE UTRZYMUJE POJEMNIKA NAWET PODCZAS PRACY	- FILTR JEST ZATKANY - OBIEG PNEUMATYCZNY INFILTRUJE POWIETRZE	- ZMIEŃ FILTR (ZGŁOŚ SIĘ DO OSOBY WYKWALIFIKOWANEJ) - ZGŁOŚ SIĘ DO OSOBY WYKWALIFIKOWANEJ

9.0 AKCESORIA

DOŁĄCZONE AKCESORIA:

- KABEL ZASILAJĄCY Z WTYCZKA EN 60320-C13 AND PLUG SCHUKO EEC 7 – VII
- POJEMNIK 500 CC Z POKRYWĄ I ŁOPATKĄ MIESZAJĄCĄ
- 1 KLUCZ DOCISKOWY M.M. 5

AKCESORIA DOSTĘPNE NA ZAMÓWIENIE:

- 1 PODPORA DO PRZYMOCOWANIA URZĄDZENIA DO ŚCIANY
- POJEMNIK 200 CC Z POKRYWĄ I ŁOPATKĄ MIESZAJĄCĄ
- POJEMNIK 1000 CC Z POKRYWĄ I ŁOPATKĄ MIESZAJĄCĄ
- POJEMNIK 2000 CC Z POKRYWĄ I ŁOPATKĄ MIESZAJĄCĄ

10.0 ZAŁĄCZNIKI

10.1 RYSUNEK MONTAŻOWY I WYKAZ CZĘŚCI ZAMIENNYCH

10.2 SCHEMAT POŁĄCZEŃ

10.3 ZNAKI I CERTYFIKATY


Model ten został sprawdzony zgodnie z dyrektywą 89/392/EWG i późniejszymi modyfikacjami.

Na urządzeniu została umieszczona tabliczka znamionowa zgodna z datą i certyfikatem, znakiem CE i deklaracją zgodności wymienioną w oświadczeniu i w tym podręczniku.



CARPENTERIA MACCHINA

A 0 1 2 3 4 5 6 7 B

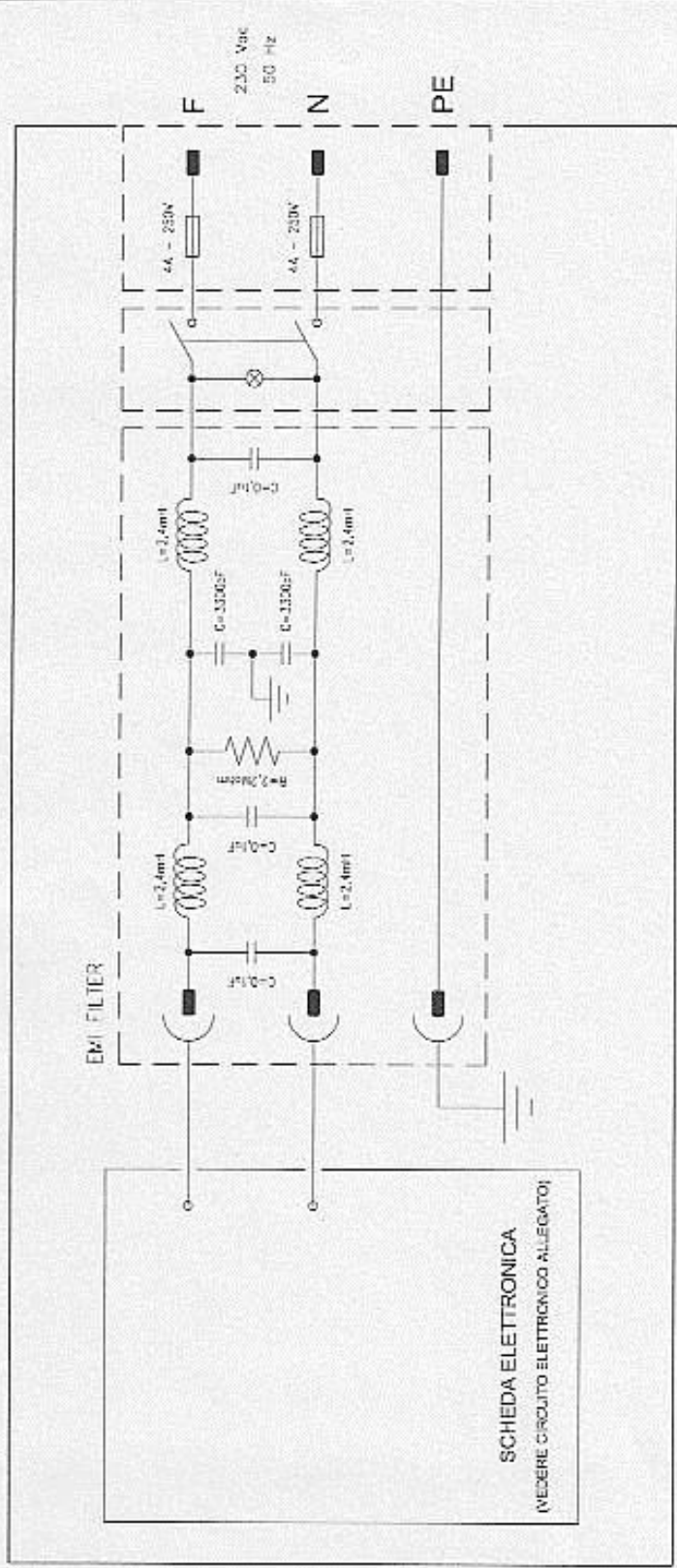

Parametri	Condizioni Prove Strumentale		Prova Strumentale (second ay)
	Resistenza inserita ultrasuoni disassemblati	Resistenza disassemblati ultrasuoni inseriti	
Tensione di alimentazione (V)	230	230	230
Frequenza (Hz)	50	50	50
Corrente assorbita (A)	1,90	0,92	C,DE
Potenza Assorbita (W)	435	211	1,4

4
 3
 2
 1
 C. PIZZAGNE
 REV. 05/04/2004

Nuova A.S.A.V. s.p.a.
 Via dell'Industria, 44
 42025 CAVRIAGO (RE) ITALY

Schema elettrico circuitale
 Macchina ultrasuoni per pulizia
 in ambito odontoiatrico

Pagina 21 di 31

A norma di legge e' vietata ristampa o commercio o altri a contenuto del presente allegato.



10.4 DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Dyrektywa 89/392/EWG i późniejsze modyfikacje

my

NUOVA A.S.A.V. SNC
VIA DELL'INDUSTRIA, 44
42025 CAVRIAGO (RE) ITALIA

Deklarujemy na naszą wyłączną odpowiedzialność, że wyrób:

ELECTRIC MIXER
MODEL MX4-MXR

którego ta deklaracja dotyczy jest zgodny z ustaleniami w dyrektywach:

2004/108 CE (EMC)
2006/95 CE (LVD)
006/42 CE (MD)

CAVRIAGO (RE) 02/05/2011

NUOVA A.S.A.V. SNC
VIA DELL'INDUSTRIA, 44
42025 CAVRIAGO (RE) ITALIA


.....
(LeoniFranco)

11.0 OGRANICZONA GWARANCJA PRODUCENTA

OGRANICZONA GWARANCJA: NUOVA A.S.A.V. snc (NA) gwarantuje, że **ELECTRIC MIXER MODEL MX4-MXR**, sterowany przez silnik elektryczny jest wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez 5 lat od daty zakupu.

Gwarancja jest ważna tylko wtedy gdy produkt został kupiony od N.A. lub od autoryzowanych sprzedawców.

Niniejsza gwarancja nie jest ważna, jeśli produkt używano w nielegalny sposób, jeśli został zmieniony, zmiany lub naprawy zostały wykonane przez nieautoryzowane osoby, na które nie zezwala NUOVA A.S.A.V.

W przypadku, ujawnienia wad produktu, w ciągu 5 lat od zakupu, tj. wady materiałowe lub produkcyjne, należy przesłać urządzenie do producenta lub autoryzowanego serwisu na własny koszt, podając nazwisko, adres, datę, dowód sprzedaży oraz krótki opis zauważonych wad.

N.A. według własnego uznania, dokona naprawy lub zastąpienia wadliwych produktów bez jakichkolwiek obciążeń przez nabywcę. Możliwe naprawy lub zmiany są zagwarantowane w sposób opisany powyżej do końca pierwotnego czasu gwarancji. Gwarancja jest ograniczona do naprawy i wymiany wadliwego produktu.

Nie ma żadnych innych wyraźnych lub dorozumianych gwarancji. Ponadto N.A. nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia, wtórne lub inne szkody, nie ponosi kosztów i wydatków z wyjątkiem tych, które związane są bezpośrednio z naprawą lub wymianą jak opisano powyżej. Gwarancja nie obejmuje naprawy/wymiany części, które zużywają się podczas normalnej eksploatacji, (jak np., pojemniki, żarówki, bezpieczniki, narzędzia tnące itp.)

DYSTRYBUTOR:

HOLTRADE EKSPORT- IMPORT

ul. Kościuszki 51, 05-500 Piaseczno
tel./fax +48 22 750 40 70, 600 919 111
www.holtrade.pl